

1. Sujete la mascarilla por las bandas elásticas y colóquela en la cara apoyándola sobre la barbilla, después ajústela hacia a la nariz.
2. Tire de las bandas elásticas hacia atrás y colóquelas en la parte posterior de ambas orejas.
3. Coloque los dedos en el medio del clip nasal y presione ambos dedos mientras mueve las yemas de los dedos a ambos lados a lo largo del clip nasal, hasta que el clip nasal se ajuste completamente a la forma del puente de la nariz.
4. Compruebe que la mascarilla está correctamente acoplada a la cara, para ello cubra la mascarilla con ambas manos y exhale. Si sale mucho aire por los bordes de la mascarilla deberá ajustársela nuevamente.



Importado por:

MX ONDA, S.A.

Isla de Java, 37 28034 – MADRID

e-mail: info@mxonda.es www.mxonda.es

Teléfono de información y Servicio Técnico: **902 551 501**